



FORTSAN DO BRASIL IND. QUÍM. E FARMACÊUTICA LTDA
CONTROLE DE QUALIDADE – FICHA TÉCNICA
REGISTR: FORTZYME PLUS 323370022

1) Características físicas e químicas:

Aspecto - Líquido límpido e isento de material estranho

Cor - Azul

Forma farmacêutica – Líquida / solução

Apresentação - Líquida / solução

2) Especificação do produto:

pH do produto (Puro) - 7,5 - 8,5

Densidade (g/ml/20°C) – 1,05

Viscosidade (H4-50 RPM) - >200cps

3) Composição:

- Tensoativos não –iônico, enzimas (protease, lipase, amilase e carboidrase), álcool isopropílico, adjuvantes e água.

4) Apresentação

- Caixa contendo 12 embalagens de 1,0L
- Caixa contendo 02 embalagens de 5,0L
- Caixa contendo 12 embalagens de 500ml

5) Campo de aplicação

- Detergente enzimático indicado para desincrustação e remoção de resíduos orgânico de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

6) Modo de uso:

Limpeza Manual/Lavadora Ultrassônica:

1) Em uma cuba previamente limpa, prepare uma solução de limpeza adicionando 4ml (0,4%) de FORTZYME para cada litro de água, ou na mesma proporção em outras quantidades.

2) Mergulhe o material deixando 5 minutos.

3) Exponha as áreas críticas: lumens, articulações e ranhuras. Desmonte os materiais articulados (vídeo cirurgia e outros), mergulhando completamente os componentes. Ter o cuidado que a solução atinja todos os canais (aspire e ejete a solução pelos canais), Enxaguar em abundância seguindo recomendação de enxágue RDC 15/2012 e secar, eliminando completamente os resíduos de canais e fendas etc. Na limpeza com lavadora ultrassônica, seguir instruções de uso e programação do equipamento.

Avenida 23 de Junho, 881 – BR 116, Km 20 – Jabuti/ Eusébio – Ceará.

Tel. (85) 3275.1616



Termodesinfetadora ou Lavadora Ultrassônica com dosagem automática:

Programa a diluição da lavadora com 4 ml (0,4%) do FORTZYME para cada litro de água; o tempo/temperatura do ciclo deve ser qualificado de acordo com procedimento operacional padrão (POP)* definido pelo usuário seguindo a RDC 15/2012. Caso o equipamento não possua fase de enxágue enxaguar em abundância seguindo recomendação da RDC 15/2012 e secar, eliminando completamente os resíduos de canais e fendas etc.

Cuidados no armazenamento: Conservar o frasco sempre bem fechado, ao abrigo da luz e do calor excessivo.

Precauções

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Manter o produto em local fresco, ao abrigo da luz, temperatura e umidade elevadas.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação impressa no rótulo.